

	Uristick9
	versie nov 2015

Gebruiksaanwijzing:

- mid-portion ochtendurine, niet het begin of einde van de urine straal, maar vang halverwege de straal op
- bij voorkeur niet over de strip plassen maar de urine opvangen en de strip 2 secondes erin dopen
- de overtollige urine aan de achterzijde van de strip met toiletpapier afvegen
- na 1 minuut de strip aflezen en de uitslag hieronder aankruisen


De kleurenfoto voor het aflezen is te vinden op www.lie.info/uristick9.jpg

De Uristick tussen 60 en 120 secondes aflezen en op dit formulier aankruisen. Na verloop van tijd kunnen de kleurreacties op het stripje vervagen of verlopen.

Disclaimer :

Deze test geeft geen klinisch gevalideerde uitslagen waarop medische beslissingen genomen kunnen worden.

De uitslagen kunnen hooguit een aanwijzing geven en kunnen geen aandoeningen diagnosticeren of uitsluiten.

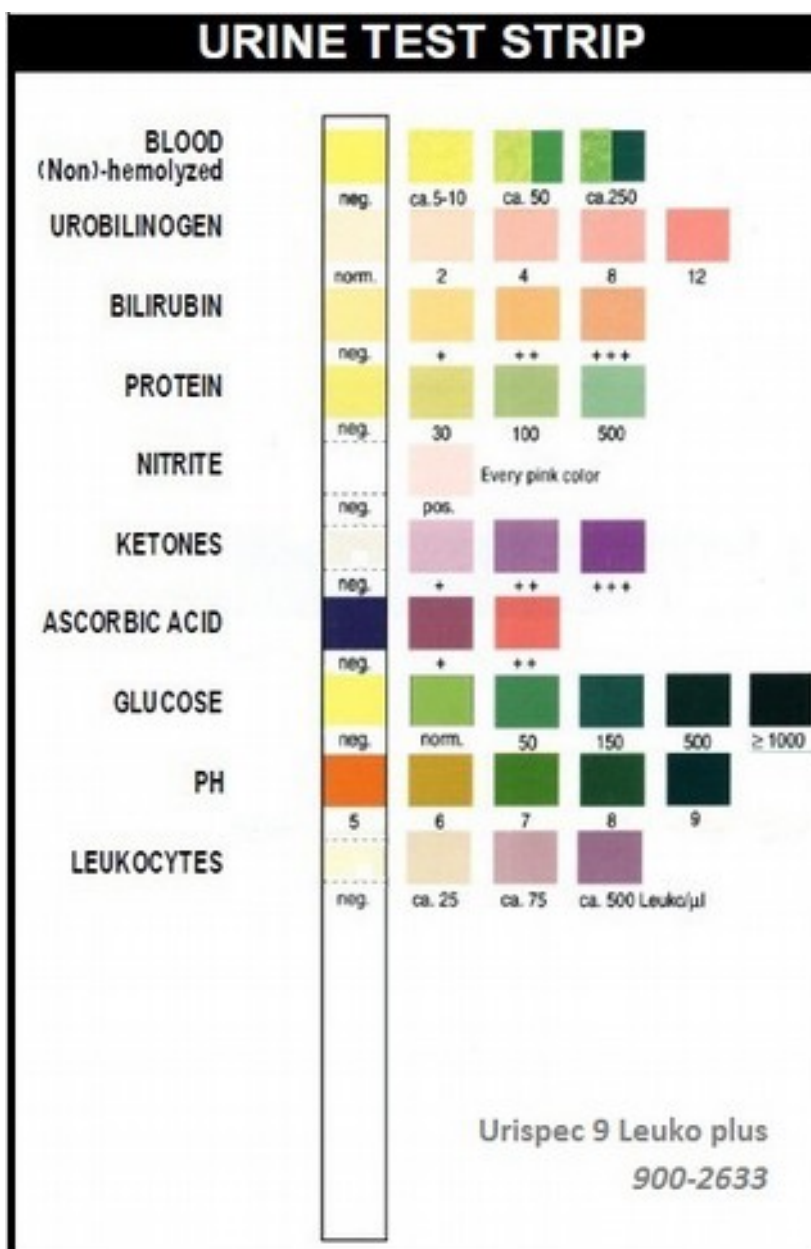

Testdatum : _____

Ochtendurine : ☐ JA / ☐ NEE

Mid-portion : ☐ JA / ☐ NEE